

ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ПЕРОКСИДНУЮ СИСТЕМУ AOSEPT® PLUS HYDRAGLYDE®: 3 ПРОСТЫХ ШАГА



Промойте линзы

Поместите контактные линзы в линзодержатель, закройте крышку и промойте раствором AOSEPT® PLUS HYDRAGLYDE® в течение 5 секунд.



Наполните контейнер

Наполните контейнер раствором AOSEPT® PLUS HYDRAGLYDE® до уровня отметки. Поместите линзодержатель в контейнер и плотно закройте.



Оставьте на 6 часов

Оставьте линзы в контейнере минимум на 6 часов или на всю ночь. Раствору AOSEPT® PLUS HYDRAGLYDE® нужно время для очищения, дезинфекции и нейтрализации. Через 6 часов AOSEPT® PLUS HYDRAGLYDE® превращается в нейтрализованный раствор, безопасный для глаз.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА

Внимательно прочитайте инструкцию перед применением раствора AOSEPT® PLUS HYDRAGLYDE®



Раствор AOSEPT® PLUS HYDRAGLYDE® можно использовать только со специальным контейнером, вложенным в упаковку. Никогда не используйте другие контейнеры!



Не промывайте линзы раствором AOSEPT® PLUS HYDRAGLYDE® перед тем, как их надеть. Если нужно промыть линзы, используйте стерильный солевой раствор.



Не оставляйте линзы в растворе менее чем на 6 часов. Это минимум, необходимый для нейтрализации раствора.



Никогда не закапывайте раствор AOSEPT® PLUS HYDRAGLYDE® в глаза.